




NOVA-Praxis-Hygiene®

AURUS d.o.o.
Puconci 251
9201 PUCONCI
www.aurus.si
info@aurus.si
T/F:+386(0)2 573 51 44
T:+386(0)599 358 69
GSM:+386(0)41 680 141

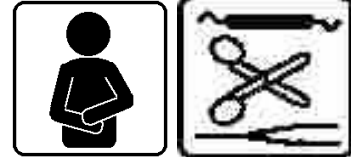

Nova Orange

Tip izdelka

Čistilno dezinfekcijsko sredstvo za odstranjevanje madežev. V steklenici je pripravljena raztopina za takojšnjo uporabo. Je na bazi izopropanola in terpena pomaranče, kar daje izdelku prijeten vonj.

Lastnosti

Nova Orange nežno čisti in je prijazen do kože. S svojo edinstveno sestavo preprečuje izsušitev kože.

Področja uporabe

- odstranjevanje odtisnih mas, alginatnih ostankov mavca z odtisnih žlic in inštrumentov
- odstranjevanje krvi in ostankov beljakovin z inštrumentov, stekla in kovinskih (inox) površin
- odstranjevanje trdovratnih etiket s površin
- za lažje odstranjevanje lepila pri obližih
- čiščenje ostankov mavca pri mavčnih povojih
- čiščenje ostankov joda, oljnih madežev in markirnih znakov s kože

Uporaba

Manjše količine raztopine nanesite na mehko krpo in rahlo odstranite madeže s predmetov ali ostanke s površine kože. Tako očiščeno površino sperite z vodo.

Opozorilo

Pred prvo uporabo na nevidnem delu predmeta preizkusite možnost reakcije. Možne so reakcije pri umetnih masah, posebej pri amorfnih termoplastih, kot so akrilno steklo in polikarbonat.

Previdna uporaba pri osebah z občutljivo kožo. Pri prepogosti uporabi se lahko pojavijo rahla vnetja. Vnete dele kože takoj namillite in sperite s toplo vodo.

Sestava

izopropanol, terpen pomaranče, decil-oleati

Pakiranje

500 ml plastenka

Posebna opozorila

R10 vnetljivo.

Originalna embalaža Nova Orange je iz posebnega materiala, zato z njim ne polnite drugih plastenk.

Nova Orange ustreza EU direktivam za kozmetične proizvode.