

NOVA-Praxis-Hygiene®

AURUS d.o.o.
Puconci 251
SI-9201 Puconci
E: info@aurus.si
T/F:02/57-35-144
M: 041-680-141
www.aurus.si



Novasept Soft konz. CE 0124

Brez aldehydov in fenolov

Tip izdelka

Koncentrirani kombinirani pripravek za razkuževanje in čiščenje vseh vrst inventarja in površin. Novasept Soft konz. je certificiran po **VAH/DGHM**. Je medicinski pripomoček razreda IIa.

Indikacije

Je vsetransko uporaben pripravek za razkuževanje in čiščenje površin in predmetov v medicini. Primeren je za materiale iz stekla, porcelana, kovine, gume, lesa, aluminija in akrilnega stekla.

Uporaba

Površine popršite z raztopino Novasept Soft konz. in obrišite s krpo.

Površine po delovanju razkužila sperite s čisto vodo!

Priprava raztopine, npr.: 1,0 % raztopina: 10 ml razkužila zamešati v 990 ml vode.

Sestava

100 g vsebuje 9,90 g tetra amonijeve spojine

Mikrobiološke lastnosti in čas delovanja

Spekter	1 min		5 min		15 min		30 min		60 min		240 min	
	brez	z	brez	z	brez	z	brez	z	brez	z	brez	z
bakterije in glivice ^{1/2}	5 %		2 %	3 %	2 %		1 %	2 %	1 %		0,5 %	
virusi ³	HCV											
	0,25 %											
	Vaccinia / HBV / HIV	2 %		1 %				0,5 %				
Herpes / SARS / H5N1												

¹ razkuževanje površin po VAH/DGHM

² M.terrae: 3,05 – 15 min, 1,0% - 30 min

³ virucidno po RKI priporočilih publikacije Bundesgesundheitsblatt 01-2004

Pakiranje

5 000 ml kanister

pripomočki: pipica za kanister, pumpica za kanister, dozirna plastenka za koncentrate, odpiralnik kanistrov

Testirano za primernost čiščenja akrilnega stekla pri podjetju Röhm iz Darmstadta.

Posebna opozorila

Xi dražilno. R36/38 Draži oči in kožo. S2 Hraniti izven dosega otrok. S7 Hraniti v tesno zaprti posodi. S26 Če pride v stik z očmi, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. S28 Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. S37/39 Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.


Biolóško razgradljivo po EU direktivi za detergente Nr. 648/2004. Reg.-Nr. N-24426, N-24427, N-24428

Novasept Soft konz. uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.



NOVA-Praxis-Hygiene®

AURUS d.o.o.
Puconci 251
SI-9201 Puconci
E: info@aurus.si
T/F:02/57-35-144
M: 041-680-141
www.aurus.si

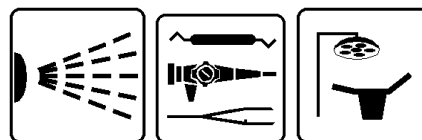

Novasept CE 0124

Brez vsebnosti amonijaka in aldehydov

Tip preparata

Pripravljena dezinfekcijska raztopina za razprševanje na bazi etanola in propanola. Uporabljajte za učinkovito in hitro razkuževanje površin. Novasept je certificiran po VAH/DGHM. Je medicinski pripomoček razreda IIa.

Področja uporabe

Hitra dezinfekcija za alkoholno obstojne površine in predmete v zdravniških ambulantah, bolnišnicah (npr. razkuževanje operacijskega inventarja, ročnikov in kolenčnikov v zobozdravstvenih ambulantah, zobozdravstvenih stolov...).

Uporaba

Popršite predmete ali celotno površino z največ 30 cm razdalje z nerazredčenim Novasept-om in pustite delovati. Novasept se osuši v zelo kratkem času, dodatno brisanje ni potrebno.

Preverite alkoholno obstojnost površin – za alkoholno neobstojne površine iz umetnih mas (pleksi steklo) ga ne uporabljajte.

Namig: za preprečitev prevelike obremenitve prostora z alkoholom, nanesite razkužilo na krpo za enkratno uporabo in pobrišite površino.

Mikrobiološke lastnosti in čas delovanja

Spekter	obremenitev		Čas delovanja
	brez	z	
bakterije in glivice ¹	√	√	30 s
tuberkuloza ²	√	√	
		√	60 s
virusi ³	HBV / HIV / HCV	√	30 s
	Adeno / Rota / Vaccinia	√	
	Herpes / SARS / gripe (incl. H5N1)	√	

¹ razkuževanje površin po VAH/DGHM

² M.terrae

³ virucidno po RKI priporočilih publikacije Bundesgesundheitsblatt 01-2004

Sestava: raztopina etanola in n-propanola

Pakiranje

5 000 ml kanister

pripomočki: 500 ml / 1 000 ml pršilka


pipica za kanister, odpiralnik kanistrov

Posebna opozorila

F lahko vnetljivo, vsebuje alkohol, gorišče po DIN 51 755: > 27° C.

R11 Lahko vnetljivo. R36 Draži oči. S2 Hraniti izven dosega otrok. S7/9 Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračenem mestu. S16 Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. S23 Ne vdihavati hlapov. S25 Preprečiti stik z očmi. Reg.-Nr. N-24500, N-24501

Novasept uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.

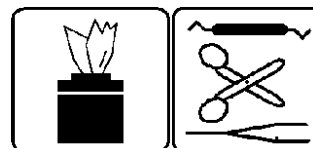

Novasept Tücher CE 0124

Brez aldehydov

Tip izdelka

Pripravljeni robčki za čiščenje in razkuževanje površin na bazi etanola in propanola, brez amonijevega klorida. Izdelek je certificiran pri **DGHM** (Nemška družba za higieno in mikrobiologijo) in je na **VAH** listi.

Indikacije

Robčki so namenjeni za čiščenje in razkuževanje vseh površin v ambulantah in bolnišnicah: delovni stoli, operacijski inventar, postelje, ročaji, ročniki in kolenčniki v zobozdravstvenih ambulantah...

Navodilo za uporabo

Površine in predmete temeljito obrišite z robčkom in pustite, da se osuši.

Ni primerno za alkoholno občutljive površine.

Mikrobiološke lastnosti in čas delovanja

Spekter		obremenitev		Čas delovanja
		brez	z	
bakterije in glivice ¹		√	√	30 s
tuberkuloza ²		√		
			√	60 s
virusi ³	HBV / HIV / HCV	√	√	30 s
	Adeno / Rota / Vaccinia	√	√	
	Herpes / SARS / gripe (incl. H5N1)	√	√	

¹ razkuževanje površin po VAH/DGHM

² M.terrae

³ virucidno po RKI priporočilih publikacije Bundesgesundheitsblatt 01-2004

Pakiranje

Refil za dozo

150 kosov (velikost robčka 14,0 cm x 19,0 cm)

Posebna opozorila


F lahko vnetljivo. Vsebuje alkohol, gorišče po DIN 51 755: > 27° C.

R11 Lahko vnetljivo. R36 Draži oči. S7/9 Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračenem mestu.

S16 Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. S23 Ne vdihavati hlapov. S25 Preprečiti stik z očmi.

Novasept robčke uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.

Novaton FF 0124

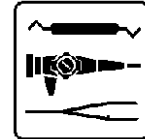

Brez formaldehidov

Tip izdelka

Novaton FF je koncentrirani kombinirani pripravek za razkuževanje in čiščenje vseh vrst medicinskih inštrumentov z visoko protikorozijsko zaščito. Je certificiran po **VAH/DGHM**. Je medicinski pripomoček razreda IIa.

Področja uporabe

Novaton FF je primeren za razkuževanje in čiščenje vseh medicinskih inštrumentov, kot tudi termolabilnih materialov na vseh področjih zdravniške prakse. Novaton FF se priporoča za laboratorijske naprave, pripomočke za anestezijo in endoskope.

Uporaba

Inštrumente takoj po uporabi potopite v pripravljeno raztopino (npr. 2,0% raztopina = 80 ml koncentrata zamešati s 3920 ml vode). Cela površina inštrumentov mora biti prekrita z raztopino. Inštrumente po razkuževanju sperite s toplo tekočo vodo, osušite in sterilizirajte v sterilizatorju. Upoštevajte navodila proizvajalca inštrumentov in sterilizatorja.

Trajnost: 14 dni, raztopino pri vidnih organskih obremenitvah zamenjajte.

Opozorilo: Ne mešajte z drugimi proizvodi. Obstaja možnost deformacije, zabarvanja in/ali neučinkovanja raztopine. Pred prvo uporabo inštrumente in vse pripomočke dobro sperite s tekočo vodo in tako odstranite ostanke ostalih učinkovin. Ni primerno za aluminij. Nujno upoštevajte čas delovanja in koncentracijo raztopine.

Mikrobiološke lastnosti in čas delovanja

Spekter		5 min		15 min		30 min ³		60 min	
		brez	z	brez	z	brez	z	brez	z
bakterije in glivice ¹				2,0	%	1,5	%	1,5	%
mikobakterije ²				4,0	%	3,0	%	2,0	%
virusi ³	HBV / HIV, HCV	1,0	%						
	Adeno, Vaccinia								
	Papo virus			2,0	%				
	Polio virus					4,0	%	2,0	%

¹ razkuževanje površin po VAH/DGHM

² M.terrae

³ virucidno po RKI priporočilih publikacije Bundesgesundheitsblatt 01-2004

Pakiranje

5 000 ml kanister

pripomočki: pipica za kanister, pumpica za kanister, dozirna plastenka za koncentrate, odpiralnik kanistrov

Posebna opozorila

Xn zdravju škodljivo. R20/22 Zdravju škodljivo pri vdihovanju in pri zaužitju. S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. R41 Nevarnost hujših poškodb oči. R42/43 Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihovanju in v stiku s kožo. S2 Hraniti izven dosega otrok. S26 Če pride v stik z očmi, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. S28 Pri stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. S35 Vsebina in embalaža morata biti varno odstanjeni. S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati nalepko. Reg.-Nr.: N-25076

Novaton FF uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.



AURUS d.o.o.
Puconci 251
SI-9201 Puconci
E: info@aurus.si
T/F: 02/57-35-144
M: 041-680-141
www.aurus.si



Novacin CE 0124

Tip izdelka

Pripravljeno razkužilo in čistilo za rotirajoče natančne zobozdravstvene inštrumente (svedri, rožice, diamanti...) na bazi kalijevega hidroksida, s posebnimi razredčili in zaviralci korozije. Razkužilo je medicinski pripomoček razreda IIa in je certificirano po **VAH/DGHM**.

Indikacije

Novacin je primeren za razkuževanje in čiščenje vseh rotirajočih natančnih zobozdravstvenih inštrumentov.

Uporaba

Že pripravljena raztopina – ni potrebno redčiti.

Inštrumente po uporabi, brez predhodnega čiščenja položite v pokrito posodo z raztopino. Novacin je primeren za vse ultrazvočne čistilce. Po končanem razkuževanju vzemite inštrumente iz Novacina, dobro sperite s tekočo vodo in dodatno sterilizirajte. Tekočino pri vidnih znakih onesnaženosti zamenjajte oziroma jo vsak dan na novo pripravite.

Mikrobiologija

Novacin delujeta baktericidno (vklj. TBC, MRSA), fungicidno, sporicidno, virucidno (vklj. HBV/HIV/HCV).

Sestava

100 g raztopine vsebuje 2,0 g kalijevega hidroksida

Čas delovanja

Po priporočilih DGHM: splošna uporaba konc. Novacin - 5 minut. Za uničenje virusa HBV konc. uporabite Novacin - 15 minut.

Pozor: Ni primerno za aluminij!

Kemične in fizikalne lastnosti

Oblika, barva, vonj: tekoča, brezbarvna raztopina z neokarakteriziranim vonjem. pH-vrednost: 13,5 +/- 0,5.

Pakiranje

5 000 ml kanister

pripomočki: pipica za kanister, odpiralnik kanistrov

Posebna opozorila

C jedko. R22 Zdajju škodljivo pri zaužitju. R35 Povzročča opekline. R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. S26 Če pride v stik z očmi, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. S35 Vsebina in embalaža morata biti varno odstanjeni. S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. S45 Pri nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Novacin uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.



NOVA-Praxis-Hygiene®

AURUS d.o.o.
Puconci 251
SI-9201 Puconci
E: info@aurus.si
T/F:02/57-35-144
M: 041-680-141
www.aurus.si

Novaprosil 0124



Tip izdelka

Pripravljena raztopina za čiščenje in razkuževanje protez, vseh vrst odtisov ter odtisnih žlic. Ne vpliva na kakovost odtisa. Je medicinski pripomoček razreda IIa.

Uporaba

Odtise iz alginata in hidrokoloida pomočite za kratek čas v nerazredčeno raztopino, nato pustite 10 minut, da se osuši.

Ostale odtisne materiale pomočite za 10 minut v nerazredčeno raztopino.

Odtisi morajo biti potopljeni v razkužilo, nato jih sperite z vodo.

Proteze in odtise ne smete pustiti v razkužilu več kot 30 minut.

Raztopino ob vidni onesnaženosti zamenjajte.

Pri majhnih obremenitvah lahko raztopino uporabljate do 7 dni.

Mikrobiologija

Novaprosil deluje baktericidno, fungicidno, virucidno (HBV/HIV/Rota-virusi).

Kemični-fizikalni podatki

Oblika, barva, vonj: tekoče, svetlo modro, neznačilen

pH-vrednost: 5,5 +/-1,0

Pakiranje

5 000 ml kanister

pripomočki: pipica za kanister, odpiralnik kanistrov


Posebna opozorila

Po EU zakonodaji izdelka ni potrebno posebej označevati.

Novaprosil uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.



AURUS d.o.o.
Puconci 251
SI-9201 Puconci
E: info@aurus.si
T/F:02/57-35-144
M: 041-680-141
www.aurus.si

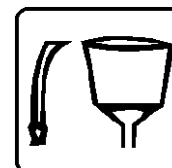

Novasuc special 0124

Brez fenolov, aldehydov in kloridov

Tip izdelka

Koncentrirana tekočina s protikorozijskim dodatkom za razkuževanje in čiščenje vseh vrst vakumsko-sesalnih naprav. Je medicinski pripomoček razreda IIa.

Področja uporabe

Novasuc special je primeren za vse dentalne sesalne naprave z ali brez odstranjevalca amalgamov.

Mikrobiologija

Novasuc special deluje baktericidno, virucidno (vklj. HBV/HIV), fungicidno ter osvežilno.

Sestava

Amonijeve soli, čistilna sredstva, zaviralci korozije, regulatorji pene.

Uporaba

2,0% raztopina: 20 ml Novasuc special zamešajte v 1000 ml tople vode (do max. 60°C) in raztopino vlijte v sesalno napravo. Pustite delovati 15 minut, nato posesajte (upoštevajte navodila proizvajalca!).

Pri večji obremenitvi s krvjo in beljakovinami uporabite svežo pripravljeno raztopino večkrat na dan.

Novasuc special vsebuje negovalne substance za sesalne naprave, zato ga ne mešajte z drugimi dodatki oziroma drugimi preparati.

Posebo obvestilo – nujno upoštevajte:

Pred prvo uporabo sesalno napravo dobro sperite z vodo, da ne bi prišlo do reakcije z drugimi preparati!

Koncentracija za uporabo je 2,0%.

Pakiranje

5 000 ml kanister

pripomočki: pipica za kanister, pumpica za kanister, dozirna plastenka za koncentrate, odpiralnik kanistrov


Posebna opozorila

Xi dražilno. R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju. R36/38 Draži oči in kožo. R43 Stik s kožo lahko povzroči preočitljivost. S26 Če pride v stik z očmi, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Uporabljati zaščitne rokavice. Shranjevati izven dosega otrok. Biološko razgradljivo po EU direktivi za detergente Nr. 648/2004.

Novasuc special uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.



AURUS d.o.o.
Puconci 251
SI-9201 Puconci
E: info@aurus.si
T/F:02/57-35-144
M: 041-680-141
www.aurus.si

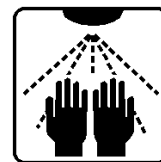

Novaderm

Ne vsebuje negovalnih učinkovin

Tip izdelka

Alkoholno dezinfekcijsko sredstvo za vtiranje v kožo in roke. Novaderm ne vsebuje dolgo delujočih sestavin ali drugih dodatkov in je zelo prijazen do kože. Novaderm je certificiran pri **DGHM** (Nemška družba za higieno in mikrobiologijo) in je na **VAH** listi.

Indikacije

Dezinfekcija kože pred injekcijami, operacijami, za higiensko razkuževanje rok in za hladilne obkladke.

Doziranje in uporaba

Če ni drugače predpisano, vtrite v kožo in pustite, da se osuši. Za higiensko razkuževanje rok uporabite 3 – 5 ml Novaderma, ga vtrite v kožo in pustite, da se osuši. Za hladilne obkladke uporabite Novaderm, ki ga razredčite z isto količino vode ter uporabite.

Higiensko in kirurško razkuževanje rok

Novaderm nanesite na suhe roke in vtirajte 30 sekund, skladu s protokolom za higiensko razkuževanje rok. Pri kirurškem razkuževanju Novaderm vtirajte v kožo 3 minute, v skladu s protokolom za kirurško razkuževanje rok.

Razkuževanje kože pred posegi, kot priporoča DGHM

- pred punkcijami, injekcijami je predhodno potrebno kožo 15 sekund razkuževati z razkužilom Novaderm,
- pred operacijami, kjer je koža tanka, kožo razkužujete 1 minuto z razkužilom Novaderm,
- kjer so v koži bolj pogosto posejane žleze lojnice in znojnice, je pred operacijami potrebno kožo 10 minut razkuževati z razkužilom Novaderm.

Mikrobiološke lastnosti

Novaderm deluje baktericidno (vklj. TBC, MRSA), fungicidno, virucidno (HBV/HIV, BVDV, HCV, Rota-herpes virusi).

Sestava 100 g raztopine vsebuje: 2-propanol 70 %(V/V) 62,8 g, prečiščena voda in dodatki 37,2 g

Pakiranje

5 000 ml kanister

pripomočki: 500 / 1 000 ml plastenka,

pumpica za plastenko, stenski dozirnik,

pipica za kanister, odpiralnik kanistrov

Opozorilo

Novaderm ni primeren za shranjevanje sterilnih inštrumentov in brizg.

Neželeni in stranski učinki


Novaderm ni primeren za razkuževanje odprtih ran in sluznice. Pri vtiranju Novaderma v kožo se lahko pojavi iritacija kože ali pekoč občutek.

Posebna opozorila

Lahko vnetljivo. Hraniti v zaprti originalni embalaži pri temperaturi do 24°C in proč od vira toplote. V primeru razlitja pobrisati razlito tekočino in jo razredčiti z vodo. Prostor temeljito prezračiti in odstraniti izvore vžiga. **Shraniti izven dosega otrok.**



AURUS d.o.o.
Puconci 251
SI-9201 Puconci
E: info@aurus.si
T/F:02/57-35-144
M: 041-680-141
www.aurus.si

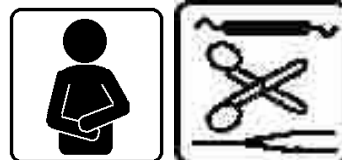

Nova Orange

Tip izdelka

Čistilno dezinfekcijsko sredstvo za odstranjevanje madežev. V steklenici je pripravljena raztopina za takojšnjo uporabo. Je na bazi izopropanola in terpena pomaranče, kar daje izdelku prijeten vonj.

Lastnosti

Nova Orange nežno čisti in je prijazen do kože. S svojo edinstveno sestavo preprečuje izsušitev kože.

Področja uporabe

- odstranjevanje odtisnih mas, alginatnih ostankov mavca z odtisnih žlic in inštrumentov
- odstranjevanje krvi in ostankov beljakovin z inštrumentov, stekla in kovinskih (inox) površin
- odstranjevanje trdovratnih etiket s površin
- za lažje odstranjevanje lepila pri obližih
- čiščenje ostankov mavca pri mavčnih povojih
- čiščenje ostankov joda, oljnih madežev in markirnih znakov s kože

Uporaba

Manjše količine raztopine nanesite na mehko krpo in rahlo odstranite madeže s predmetov ali ostanke s površine kože. Tako očiščeno površino sperite z vodo.

Opozorilo

Pred prvo uporabo na nevidnem delu predmeta preizkusite možnost reakcije. Možne so reakcije pri umetnih masah, posebej pri amorfni termoplastih, kot so akrilno steklo in polikarbonat.

Previdna uporaba pri osebah z občutljivo kožo. Pri prepogosti uporabi se lahko pojavijo rahla vnetja. Vnete dele kože takoj namilite in sperite s toplo vodo.

Sestava

izopropanol, terpen pomaranče, decil-oleati

Pakiranje

500 ml plastenka

Posebna opozorila

R10 vnetljivo.

Originalna embalaža Nova Orange je iz posebnega materiala, zato z njim ne polnite drugih plastenk.

Nova Orange ustreza EU direktivam za kozmetične proizvode.



AURUS d.o.o.
Puconci 251
SI-9201 Puconci
E: info@aurus.si
T/F:02/57-35-144
M: 041-680-141
www.aurus.si

Kreme za roke

STO4 - CREAMA PROTETTIVA, ANTIAGE, zaščitna krema proti staranju – 100 ml

Koža rok se zaradi zunanjih dejavnikov hitro postara, če je večkrat na dan ne zaščitimo in negujemo. Ferulična kislina deluje kot naravni antioksidant in ščiti kožo pred staranjem. Uporaba: kremo večkrat na dan vmasirajte v dlani rok.

STO3 - CREAMA PROTETTIVA, ANTIAGE, zaščitna krema proti staranju – 200 ml

2008 - RENNOVATRICE MANI 10%, pomlajevalna krema za roke – 100 ml

Za učinkovit boj proti pigmentacijam na rokah. Vsebuje 10% glikolne kisline in izvleček rmana. Glikolna kislina spodbuja celično obnovo z nežnim pilingom, izboljšuje hidracijo kože, povečuje proizvodnjo kolagena in elastina ter tako kožo pomlajuje. Rman varuje kožo pred vnetji, jo sprošča in pospeši prekrvavitev.

Uporaba: kremo vmasirajte v roke po manikuri ali zvečer pred spanjem ter pustite, da se vpije.

2008 B - RENNOVATRICE MANI 10%, pomlajevalna krema za roke – 200 ml

OPHARDT hygiene **Dozirniki**



Ingo-man® Touchless, IMP T A, avtomatski baterijski dozirnik za razkužilo:

- senzor omogoča doziranje razkužila brez dotika,
- vse kovinske dele lahko očistite v pomivalnem stroju,
- vsi deli dozirnika so iz nerjavečih materialov in so zelo obstojni,
- vse dele dozirnika lahko zamenjate, tudi aluminijasto črpalko,
- preizkušena tehnologija in visoka kvaliteta omogočata 3-letno garancijo,
- možnost nastavitve optimalnega brizga odmerka,
- primeren za 1.000 ml platenko,
- več najdete na www.aurus.si



Stenski kovinski nosilec

- je iz nerjavečega materiala, 1.000 ml in 500 ml platenko,
- pritrdite na steno s tremi vijaki in razkužilo bo vedno pri roki.