



**NOVA-Praxis-Hygiene®**

AURUS d.o.o.  
Puconci 251  
SI-9201 Puconci  
E: info@aurus.si  
T/F:02/57-35-144  
M: 041-680-141  
[www.aurus.si](http://www.aurus.si)



## Nova Orange

### Tip izdelka

Čistilno dezinfekcijsko sredstvo za odstranjevanje madežev. V steklenici je pripravljena raztopina za takojšnjo uporabo. Je na bazi izopropanola in terpena pomaranče, kar daje izdelku prijeten vonj.

### Lastnosti

Nova Orange nežno čisti in je prijazen do kože. S svojo edinstveno sestavo preprečuje izsušitev kože.

### Področja uporabe

- odstranjevanje odtisnih mas, alginatnih ostankov mavca z odtisnih žlic in inštrumentov
- odstranjevanje krvi in ostankov beljakovin z inštrumentov, stekla in kovinskih (inox) površin
- odstranjevanje trdovratnih etiket s površin
- za lažje odstranjevanje lepila pri obližih
- čiščenje ostankov mavca pri mavčnih povojih
- čiščenje ostankov joda, oljnih madežev in markirnih znakov s kože

### Uporaba

Manjše količine raztopine nanesite na mehko krpo in rahlo odstranite madeže s predmetov ali ostanke s površine kože. Tako očiščeno površino sperite z vodo.

### Opozorilo

**Pred prvo uporabo na nevidnem delu predmeta preizkusite možnost reakcije.** Možne so reakcije pri umetnih masah, posebej pri amorfnih termoplastih, kot so akrilno steklo in polikarbonat.

Previdna uporaba pri osebah z občutljivo kožo. Pri prepogosti uporabi se lahko pojavijo rahla vnetja. Vnete dele kože takoj namilite in sperite s toplo vodo.

### Sestava

izopropanol, terpen pomaranče, decil-oleati

### Pakiranje

500 ml plastenka

### Posebna opozorila

R10 vnetljivo.

Originalna embalaža Nova Orange je iz posebnega materiala, zato z njim ne polnite drugih plastenk.

**Nova Orange ustreza EU direktivam za kozmetične proizvode.**