



NOVA-Praxis-Hygiene®

AURUS d.o.o.
Puconci 251
SI-9201 Puconci
E: info@aurus.si
T/F: 02/57-35-144
M: 041-680-141
www.aurus.si



Novacin CE 0124

Tip izdelka

Pripravljeno razkužilo in čistilo za rotirajoče natančne zobozdravstvene inštrumente (svedri, rožice, diamanti...) na bazi kalijevega hidroksida, s posebnimi razredčili in zaviralci korozije. Razkužilo je medicinski pripomoček razreda IIa in je certificirano po **VAH/DGHM**.

Indikacije

Novacin je primeren za razkuževanje in čiščenje vseh rotirajočih natančnih zobozdravstvenih inštrumentov.

Uporaba

Že pripravljena raztopina – ni potrebno redčiti.

Inštrumente po uporabi, brez predhodnega čiščenja položite v pokrito posodo z raztopino. Novacin je primeren za vse ultrazvočne čistilce. Po končanem razkuževanju vzemite inštrumente iz Novacina, dobro sperite s tekočo vodo in dodatno sterilizirajte. Tekočino pri vidnih znakih onesnaženosti zamenjajte oziroma jo vsak dan na novo pripravite.

Mikrobiologija

Novacin delujeta baktericidno (vklj. TBC, MRSA), fungicidno, sporicidno, virucidno (vklj. HBV/HIV/HCV).

Sestava

100 g raztopine vsebuje 2,0 g kalijevega hidroksida

Čas delovanja

Po priporočilih DGHM: splošna uporaba konc. Novacin - 5 minut. Za uničenje virusa HBV konc. uporabite Novacin - 15 minut.

Pozor: Ni primerno za aluminij!

Kemične in fizikalne lastnosti

Oblika, barva, vonj: tekoča, brezbarvna raztopina z neokarakteriziranim vonjem. pH-vrednost: 13,5 +/- 0,5.

Pakiranje

5 000 ml kanister

pripomočki: pipica za kanister, odpiralnik kanistrov

Posebna opozorila

C jedko. R22 Zdavju škodljivo pri zaužitju. R35 Povzroča opekline. R67 Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico. S26 Če pride v stik z očmi, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. S35 Vsebina in embalaža morata biti varno odstanjeni. S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitno za oči/obraz. S45 Pri nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Novacin uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.