



**NOVA-Praxis-Hygiene®**

AURUS d.o.o.  
Puconci 251  
SI-9201 Puconci  
E: info@aurus.si  
T/F:02/57-35-144  
M: 041-680-141  
[www.aurus.si](http://www.aurus.si)



## **Novaprosil** CE 0124

### **Tip izdelka**

Pripravljena raztopina za čiščenje in razkuževanje protez, vseh vrst odtisov ter odtisnih žlic. Ne vpliva na kakovost odtisa. Je medicinski pripomoček razreda IIa.

### **Uporaba**

Odtise iz alginata in hidrokoloida pomočite za kratek čas v nerazredčeno raztopino, nato pustite 10 minut, da se osuši.

Ostale odtisne materiale pomočite za 10 minut v nerazredčeno raztopino.

Odtisi morajo biti potopljani v razkužilo, nato jih sperite z vodo.

Proteze in odtise ne smete pustiti v razkužilu več kot 30 minut.

Raztopino ob vidni onesnaženosti zamenjajte.

Pri majhnih obremenitvah lahko raztopino uporabljate do 7 dni.

### **Mikrobiologija**

Novaprosil deluje baktericidno, fungicidno, virucidno (HBV/HIV/Rota-virusi).

### **Kemični-fizikalni podatki**

Oblika, barva, vonj: tekoče, svetlo modro, neznačilen

pH-vrednost: 5,5 +/-1,0

### **Pakiranje**

5 000 ml kanister

**pripomočki:** pipica za kanister, odpiralnik kanistrov

### **Posebna opozorila**

Po EU zakonodaji izdelka ni potrebno posebej označevati.

**Novaprosil uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.**