



NOVA-Praxis-Hygiene®

AURUS d.o.o.
Puconci 251
SI-9201 Puconci
E: info@aurus.si
T/F:02/57-35-144
M: 041-680-141
www.aurus.si

Novasept Soft konz. CE 0124

Brez aldehydov in fenolov



Tip izdelka

Koncentrirani kombinirani pripravek za razkuževanje in čiščenje vseh vrst inventarja in površin. Novasept Soft konz. je certificiran po **VAH/DGHM**. Je medicinski pripomoček razreda IIa.

Indikacije

Je vsetransko uporaben pripravek za razkuževanje in čiščenje površin in predmetov v medicini. Primeren je za materiale iz stekla, porcelana, kovine, gume, lesa, aluminija in akrilnega stekla.

Uporaba

Površine popršite z raztopino Novasept Soft konz. in obrišite s krpo.

Površine po delovanju razkužila sperite s čisto vodo!

Priprava raztopine, npr.. 1,0 % raztopina: 10 ml razkužila zamešati v 990 ml vode.

Sestava

100 g vsebuje 9,90 g tetra amonijeve spojine

Mikrobiološke lastnosti in čas delovanja

| Spekter | | 1 min | | 5 min | | 15 min | | 30 min | | 60 min | | 240 min | |
|-------------------------------------|----------------------|--------|---|-------|-----|--------|---|--------|-----|--------|---|---------|---|
| | | brez | z | brez | z | brez | z | brez | z | brez | z | brez | z |
| bakterije in glivice ^{1/2} | | 5 % | | 2 % | 3 % | 2 % | | 1 % | 2 % | 1 % | | 0,5 % | |
| virusi ³ | HCV | 0,25 % | | | | | | | | | | | |
| | Vaccinia / HBV / HIV | 2 % | | 1 % | | | | 0,5 % | | | | | |
| | Herpes / SARS / H5N1 | | | | | | | | | | | | |

¹ razkuževanje površin po VAH/DGHM

² M.terrae: 3,05 – 15 min, 1,0% - 30 min

³ virucidno po RKI priporočilih publikacije Bundesgesundheitsblatt 01-2004

Pakiranje

5 000 ml kanister

pripomočki: pipica za kanister, pumpica za kanister, dozirna plastenka za koncentrate, odpirac kanistrov

Testirano za primernost čiščenja akrilnega stekla pri podjetju Röhm iz Darmstadta.

Posebna opozorila

Xi dražilno. R36/38 Draži oči in kožo. S2 Hraniti izven dosega otrok. S7 Hraniti v tesno zaprti posodi. S26 Če pride v stik z očmi, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. S28 Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. S37/39 Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Biološko razgradljivo po EU direktivi za detergente Nr. 648/2004. Reg.-Nr. N-24426, N-24427, N-24428

Novasept Soft konz. uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.