




NOVA-Praxis-Hygiene®

AURUS d.o.o.
Puconci 251
SI-9201 Puconci
E: info@aurus.si
T/F:02/57-35-144
M: 041-680-141
www.aurus.si

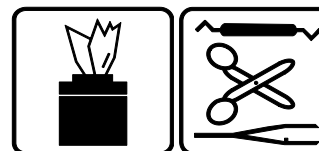

Novasept Tücher CE 0124

Brez aldehydov

Tip izdelka

Pripravljeni robčki za čiščenje in razkuževanje površin na bazi etanola in propanola, brez amonijevega klorida. Izdelek je certificiran pri **DGHM** (Nemška družba za higieno in mikrobiologijo) in je na **VAH** listi.

Indikacije

Robčki so namenjeni za čiščenje in razkuževanje vseh površin v ambulantah in bolnišnicah: delovni stoli, operacijski inventar, postelje, ročaji, ročniki in kolenčniki v zobozdravstvenih ambulantah...

Navodilo za uporabo

Površine in predmete temeljito obrišite z robčkom in pustite, da se osuši.

Ni primerno za alkoholno občutljive površine.

Mikrobiološke lastnosti in čas delovanja

Spekter		obremenitev		Čas delovanja
		brez	z	
bakterije in glivice ¹		√	√	30 s
tuberkuloza ²		√	√	
virusi ³	HBV / HIV / HCV	√	√	30 s
	Adeno / Rota / Vaccinia	√	√	
	Herpes / SARS / gripe (incl. H5N1)	√	√	

¹ razkuževanje površin po VAH/DGHM

² M.terrae

³ virucidno po RKI priporočilih publikacije Bundesgesundheitsblatt 01-2004

Pakiranje

Refil za dozo

150 kosov (velikost robčka 14,0 cm x 19,0 cm)

Posebna opozorila

F lahko vnetljivo. Vsebuje alkohol, gorišče po DIN 51 755: > 27° C.

R11 Lahko vnetljivo. R36 Draži oči. S7/9 Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračenem mestu.

S16 Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. S23 Ne vdihavati hlapov. S25 Preprečiti stik z očmi.

Novasept robčke uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.