




**NOVA-Praxis-Hygiene®**

AURUS d.o.o.  
Puconci 251  
SI-9201 Puconci  
E: info@aurus.si  
T/F:02/57-35-144  
M: 041-680-141  
[www.aurus.si](http://www.aurus.si)

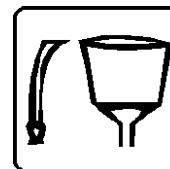

## **Novasuc special** CE 0124

**Brez fenolov, aldehydov in kloridov**

### **Tip izdelka**

Koncentrirana tekočina s protikorozijskim dodatkom za razkuževanje in čiščenje vseh vrst vakumsko-sesalnih naprav. Je medicinski pripomoček razreda IIa.

### **Področja uporabe**

Novasuc special je primeren za vse dentalne sesalne naprave z ali brez odstranjevalca amalgamov.

### **Mikrobiologija**

Novasuc special deluje baktericidno, virucidno (vklj. HBV/HIV), fungicidno ter osvežilno.

### **Sestava**

Amonijeve soli, čistilna sredstva, zaviralci korozije, regulatorji pene.

### **Uporaba**

**2,0% raztopina:** 20 ml Novasuc special zamešajte v 1000 ml tople vode (do max. 60°C) in raztopino vlijte v sesalno napravo. Pustite delovati 15 minut, nato posesajte (upoštevajte navodila proizvajalca!).

Pri večji obremenitvi s krvjo in beljakovinami uporabite svežo pripravljeno raztopino večkrat na dan.

Novasuc special vsebuje negovalne substance za sesalne naprave, zato ga ne mešajte z drugimi dodatki oziroma drugimi preparati.

### **Posebo obvestilo – nujno upoštevajte:**

Pred prvo uporabo sesalno napravo dobro sperite z vodo, da ne bi prišlo do reakcije z drugimi preparati!

Koncentracija za uporabo je 2,0%.

### **Pakiranje**

5 000 ml kanister

**pripomočki:** pipica za kanister, pumpica za kanister, dozirna platenka za koncentrate, odpiralnik kanistrov

### **Posebna opozorila**

**Xi dražilno.** R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju. R36/38 Draži oči in kožo. R43 Stik s kožo lahko povzroči preočitljivost. S26 Če pride v stik z očmi, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Uporabljati zaščitne rokavice. Shranjevati izven dosega otrok. Biološko razgradljivo po EU direktivi za detergente Nr. 648/2004.

**Novasuc special uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.**