



NOVA-Praxis-Hygiene®

AURUS d.o.o.  
Puconci 251  
SI-9201 Puconci  
E: info@aurus.si  
T/F:02/57-35-144  
M: 041-680-141  
[www.aurus.si](http://www.aurus.si)



# Novaton FF 0124

Brez formaldehidov

## Tip izdelka

Novaton FF je koncentrirani kombinirani pripravek za razkuževanje in čiščenje vseh vrst medicinskih inštrumentov z visoko protikorozijsko zaščito. Je certificiran po **VAH/DGHM**. Je medicinski pripomoček razreda IIa.

## Področja uporabe

Novaton FF je primeren za razkuževanje in čiščenje vseh medicinskih inštrumentov, kot tudi termolabilnih materialov na vseh področjih zdravniške prakse. Novaton FF se priporoča za laboratorijske naprave, pripomočke za anestezijo in endoskope.

## Uporaba

Inštrumente takoj po uporabi potopite v pripravljeno raztopino (npr. 2,0% raztopina = 80 ml koncentrata zamešati s 3920 ml vode). Cela površina inštrumentov mora biti prekrita z raztopino. Inštrumente po razkuževanju sperite s toplo tekočo vodo, osušite in sterilizirajte v sterilizatorju. Upoštevajte navodila proizvajalca inštrumentov in sterilizatorja.

Trajnost: 14 dni, raztopino pri vidnih organskih obremenitvah zamenjajte.

**Opozorilo:** Ne mešajte z drugimi proizvodi. Obstaja možnost deformacije, zabarvanja in/ali neučinkovanja raztopine. Pred prvo uporabo inštrumente in vse pripomočke dobro sperite s tekočo vodo in tako odstranite ostanke ostalih učinkovin. Ni primerno za aluminij. Nujno upoštevajte čas delovanja in koncentracijo raztopine.

## Mikrobiološke lastnosti in čas delovanja

Spekter	5 min		15 min		30 min <sup>3</sup>		60 min	
	brez	z	brez	z	brez	z	brez	z
bakterije in glivice <sup>1</sup>			2,0	%	1,5	%	1,5	%
mikobakterije <sup>2</sup>			4,0	%	3,0	%	2,0	%
virusi <sup>3</sup>	HBV / HIV, HCV		1,0	%				
	Adeno, Vaccinia							
	Papo virus			2,0	%			
	Polio virus				4,0	%	2,0	%

<sup>1</sup> razkuževanje površin po VAH/DGHM

<sup>2</sup> M.terrae

<sup>3</sup> virucidno po RKI priporočilih publikacije Bundesgesundheitsblatt 01-2004

## Pakiranje

5 000 ml kanister

**pripomočki:** pipica za kanister, pumpica za kanister, dozirna plastenka za koncentrate, odpirac kanistrov

## Posebna opozorila

**Xn zdravju škodljivo.** R20/22 Zdravju škodljivo pri vdihovanju in pri zaužitju. S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. R41 Nevarnost hujših poškodb oči. R42/43 Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihovanju in v stiku s kožo. S2 Hraniti izven dosega otrok. S26 Če pride v stik z očmi, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. S28 Pri stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. S35 Vsebina in embalaža morata biti varno odstanjeni. S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati nalepko. Reg.-Nr.: N-25076

**Novaton FF uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.**